



# Franco & Fils

DEPUIS 1955


Fabrication et conception  
de matériels para-médicaux



Zone industrielle, RN 7  
58320 Pougues les Eaux

Tél. : 03 86 68 83 22  
Fax : 03 86 68 55 95

[www.francofils.com](http://www.francofils.com)  
[info@francofils.com](mailto:info@francofils.com)

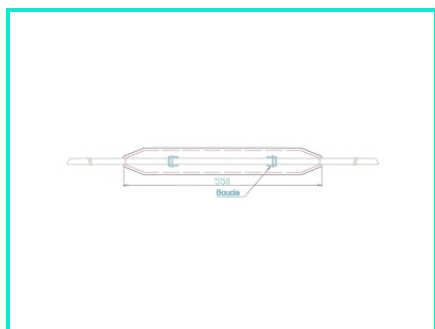

## SANGLE DE FIXATION DU THORAX A BOUCLES

Réf. : SF1-21

Partie capitonnée : 55 cm x 12,5 cm - 2,25 m de courroie + 2 boucles

Destinée à la fixation et retenue du thorax d'un patient sur une table FRANCO.

Le patient est allongé sur la table et est sanglé.

La sangle appuie au niveau du Thorax et les 2 extrémités des courroies sont prises dans les 2 boucles.

On passe la sangle sur le thorax du patient, et l'on passe sous le châssis de la table les 2 courroies pour venir les passer dans les boucles.

Bien vérifier la tension du sanglage afin que le patient ne se sente pas comprimé.

L'usage de cette sangle est prévu dans le cadre du maintien du patient sur une table Franco.

La sangle a une capacité de charge limite de 50 kg maxi. (pression exercée par le thorax)

[www.francofils.com](http://www.francofils.com)

ZONE INDUSTRIELLE - RN 7, 58320 POUQUES-LES-EAUX

Tél. : 03 86 68 83 22 - Fax : 03 86 68 55 95



Tous nos produits  
sont conformes aux  
normes européennes