



Franco & Fils

DEPUIS 1955


Fabrication et conception
de matériels para-médicaux



Zone industrielle, RN 7
58320 Pougues les Eaux

Tél. : 03 86 68 83 22
Fax : 03 86 68 55 95

www.francofils.com
info@francofils.com

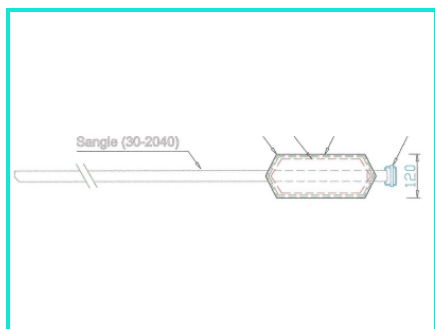

▶ SANGLE DE FIXATION A BOUCLE DES MEMBRES INFERIEURS

Réf. : SF1-22

Partie capitonnée : 30 cm x 12 cm 2,04 m de courroie + 1 boucle

Destinée à la fixation d'un membre inférieur, la sangle se pose dans la zone de la cheville ou du mollet.

On passe la sangle sous le mollet/cheville, puis la courroie est enfilée dans la boucle.

La courroie peut alors être fixée à une boucle de pouliothérapie.

Bien vérifier la tension du sanglage afin que le patient ne se sente pas comprimé.

L'usage de cette sangle est prévu dans le cadre d'exercice de lever de charge en pouliothérapie.

La sangle a une capacité de charge limite de 25 kg maxi. (Pression exercée par le membre)

www.francofils.com

ZONE INDUSTRIELLE - RN 7, 58320 POUQUES-LES-EAUX

Tél. : 03 86 68 83 22 - Fax : 03 86 68 55 95



Tous nos produits
sont conformes aux
normes européennes