


AJOUT D'UNE 2 EME COMMANDE SUR UNE TABLE EQUIPEE D' UN CADRE DE COMMANDE

Généralités :

La Table que vous utilisez est équipée d'un vérin électrique utilisant une commande à pression pneumatique.


Nota : la commande aux pieds peut être utilisée aussi avec le cadre de commande.

Dans ce cas elle est fixée directement sur le piétement de la table sous le cadre de commande.

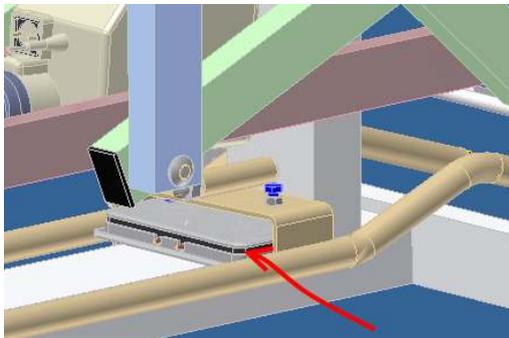

Chaque commande est reliée au vérin par un tuyau caoutchouc blanc.


Votre Table est donc équipée d'un vérin électrique reliée par un tuyau caoutchouc blanc à une commande aux pieds :

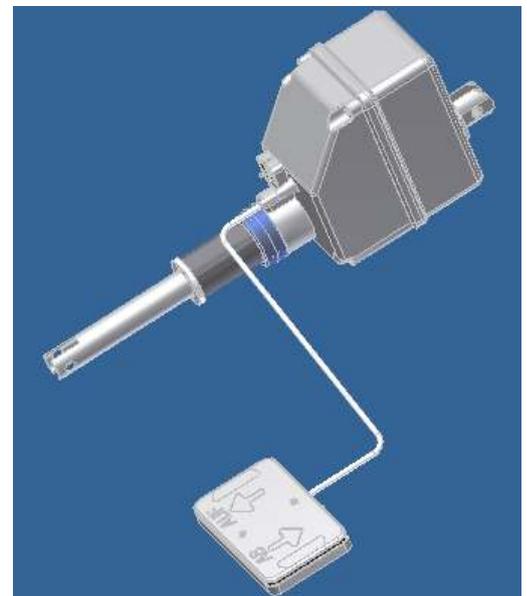


Montage d'une 2eme commande aux pieds :

1/ Tirer le tuyau caoutchouc blanc au niveau du vérin :


- le démancher du tube en laiton se trouvant sur le vérin électrique.

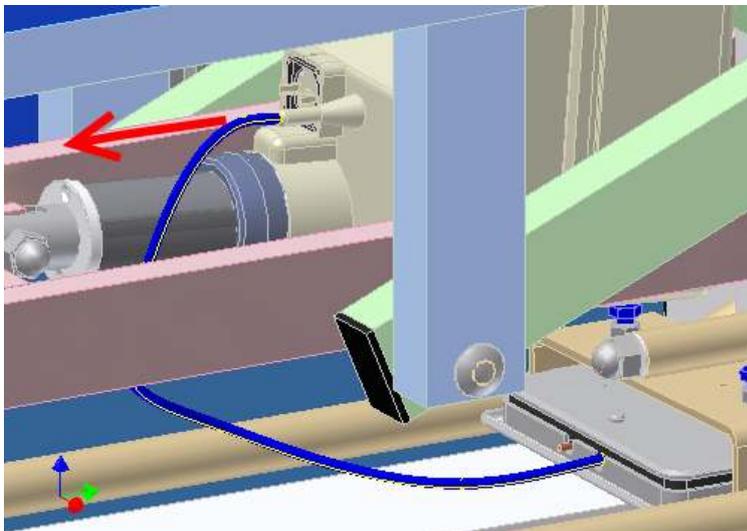


2/ Raccorder au tube en laiton le petit bout de tuyau caoutchouc :

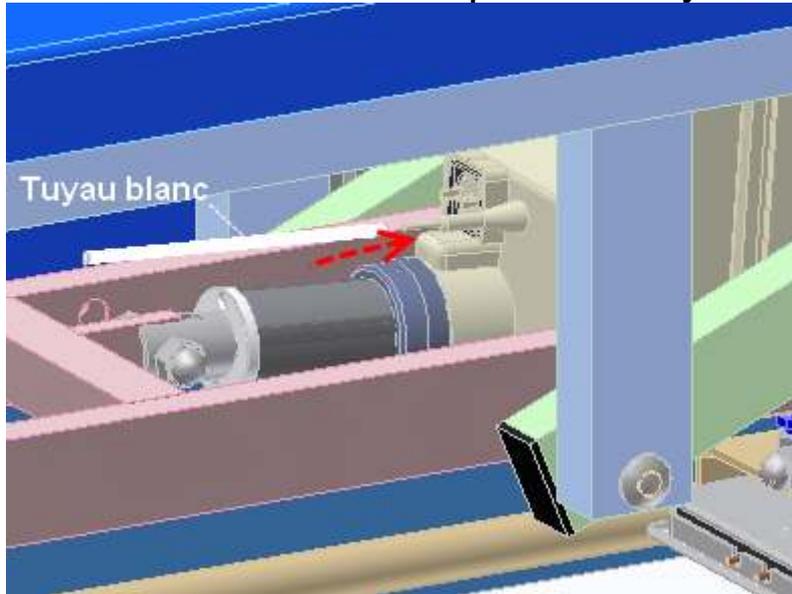

3/ Raccorder l'extrémité de ce tuyau au Té de connexion bleu :

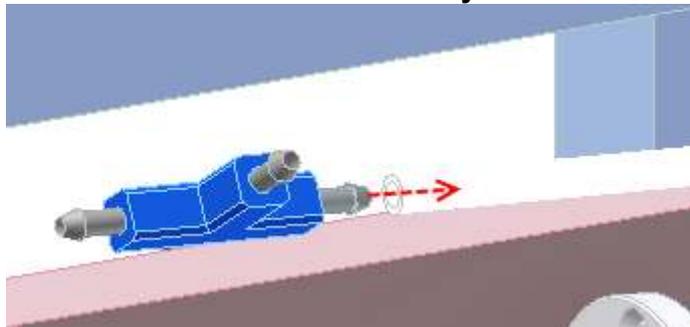

4/ Aux 2 autres extrémités du Té, emmancher les 2 autres extrémités des 2 tuyaux blancs reliant chacune des pédales aux pieds :

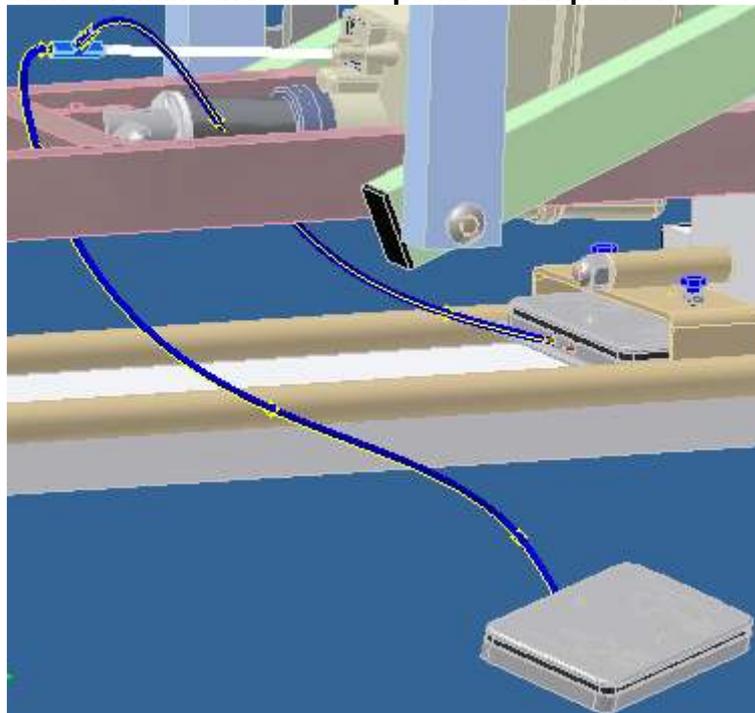

(Vérifier que les tuyaux blancs sont bien emmanchés sur l'un des 2 tubes sortant de chaque pédale aux pieds.)